

<b>【IPL】フィルター 690nm</b>						<b>【SHR】フィルター 690nm</b>					
<b>男性モード</b>						<b>男性モード</b>					
顔(髭以外)	髭	うなじ	脇	VIO		腕	足	腹	背中	連射	
15 - 20	15 - 28	15 - 20	15 - 20	15 - 25		18-25J	18-25J	15-20J	13-18J	4-6	
<b>女性モード</b>						<b>女性モード</b>					
顔	うなじ	脇	VIO			腕	足	腹	背中	連射	
10 - 18	15 - 20	8 - 14	15 - 25			16-22J	16-22J	13-19J	12-16J	4-6	
<b>キッズモード(小学~中学)</b>						<b>キッズモード(小学~中学)</b>					
顔	うなじ	脇	VIO			腕	足	腹	背中	連射	
10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15			10-15J	10-15J	10-15J	10-15J	4-6	
<b>【ニキビ跡】430nm</b>						<b>【シミ/シワ】530nm</b>					
<b>男女兼用</b>						<b>男女兼用</b>					
IPL	RF					IPL	RF				
10 - 15	10-15					18 - 26	10-15				
<b>【美白】530nm</b>						<b>【赤ら顔】430nm</b>					
<b>男女兼用</b>						<b>男女兼用</b>					
IPL	RF					IPL	RF				
15 - 20	10-15					16-22	10-15				
<b>【多機能アタッチメント】</b>											
<b>男女兼用</b>											
IPL											
鼻毛・耳毛・うなじ等	IPLモードの8からスタートして問題なければ 1ずつ上げてください										